

# Protac SenSit

Sarkow b.v.



# Gebruiksaanwijzing:

## Toepassingsmogelijkheden

De SenSit kan als gewone leunstoel worden gebruikt: de ballen verwerkt in de rugleuning en de zitting geven een stimulerende werking. Het is ook mogelijk de stoel te gebruiken met de zij- en nekflappen over het lichaam. Let er op dat de gebruiker geen hinderlijke druk ervaart van de afzonderlijke ballen, vooral bij gebruik van de stoel ter behandeling van verlamming en verstoorde sensibeleiteit.



## Kennismaking met de SenSit

Gebruik de SenSit in eerste instantie zonder de flappen dicht te klappen en neem de flappen geleidelijk in gebruik, al naar gelang de persoonlijke behoefte en voorkeur. Als behandelaar of helper kan je de flappen



zachtjes tegen de gebruiker aan duwen voor extra stimulatie door de afzonderlijke ballen. Dit kan voor meer welbehagen en ontspanning zorgen. Blijf er wel op letten dat de ballen de gebruiker geen hinder geven of irriteren, bv. teveel warmte of een drukplek/punt in de rug.

## Samenstelling

De buitenzijde van de SenSit bestaat uit gestikte compartimenten van polyester of polyester CS (vlamvertragend). De schaal is gemaakt van 100% afbreekbaar polyethyleen platen, waarvan de achterste een geplastificeerde versteviging heeft.

De binnenzak bestaat uit een hoeveelheid polystyreenkorrels waar een tweedelig compartiment met plasticballen aan is vastgenaaid. Aan de onder- en achterzijde van de binnenzak zit klittenband waarmee de zak correct in de schaal kan worden vastgezet.

De SenSit weegt ongeveer 13 kg.



## Wassen en Onderhouden

De buitenhoes en de binnenzak kunnen in de wasmachine (capaciteit min. 16 kg.). Zie tevens de wasvoorschriften aan de label van de SenSit zelf.

De polystyreenbolletjes kunnen naar verloop van tijd gaan samenpakken of plakken. Het is dan ook aan te raden om geregeld de SenSit goed op te schudden of hem op zijn kop te houden en dan op te kloppen. Hierdoor komt er weer voldoende lucht tussen de afzonderlijke bolletjes.

**De Protac SenSit is gepatenteerd.**



### **Demonteren voor het wassen:**

*Bij voorkeur door 2 personen.*

1. Haal het nekkussen uit het compartiment.
2. Maak de ritssluiting van de zitting open.
3. Maak de binnenzak met de balletjes los van de rug (klittenband).
4. Maak de ritssluiting van de compartimenten met de voor en achterplaat open.
5. Haal de balletjes uit de 2 neklappen ( 2 zakken).
6. Verwijder de binnenzak.
7. Verwijder de schuimplaat achter.
8. Verwijder de schuimplaat voor.
9. Haal de balletjes uit de zijvleugels ( 2 zakken). De balletjes kunnen meegewassen worden, om plaats te besparen in de wasmachine is het aan te raden ze te verwijderen.
10. Maak de ritssluiting weer dicht alvorens de hoes te wassen.



### **Monteren na het wassen.**

1. Spreid de hoes uit zodat het inwendige van de onderkant (met klittenband) zichtbaar wordt.
2. Plaats de binnenzak in de hoes, zodat de voorste twee stukken klittenband aan elkaar hechten.
3. Maak dan de klittenband stroken onderin vast.
4. Maak de rits van het compartiment met de voorste schuimplaat open.
5. Plaats de schuimplaat in het compartiment. Om dit te vergemakkelijken buigt u de plaat aan de beide zijden tijdens het inzetten – en duwt hen weer recht als hij op zijn plaats zit.
6. Rits het compartiment dicht.
7. Maak de rits van het compartiment voor de achterste schuimplaat open.
8. Plaats de schuimplaat in het compartiment – NB de kant met de harde plasticplaat moet naar binnengedraaid zijn. Buig ook hier de randen van de plaat om het inzetten makkelijker te maken.
9. Rits het compartiment dicht.
10. Maak het klittenband in de rug vast.
11. Rits de zitting dicht.
12. Plaats het nekkussen in het nekcompartiment.
13. Stop de balletjes weer in de nekvleugels ( 2 zakken).
14. Stop de balletjes weer in de zijkant.



# Protac SenSit Poef

## Gebruiksaanwijzing:

### Toepassingsmogelijkheden

De poef kan gebruikt worden als voetenbank bij de stoel of als een zitpoef. De puntsgewijze druk van de balletjes aan de bovenkant van de poef werkt stimulerend waardoor de gebruiker zich beter bewust wordt van zijn of haar lichaam.



### Samenstelling

De poef is gemaakt van gestikt polyester of polyester CS (vlamvertragend). De binnenzak is gevuld met polystyreenbolletjes waar een compartiment met de plasticballen aan vastgenaaid is. Aan de onderzijde van de binnenzak zit klittenband waarmee de zak correct aan de hoes kan worden vastgezet.



### Wassen en onderhouden

De buitenhoes van de poef kan gewoon in de wasmachine. De binnenzak kan ook in de wasmachine maar meestal is hiervoor een grotere, 16 kg., wasmachine nodig.

Zie tevens de wasvoorschriften op de label aan de binnenzijde van de poef.

**Sarkow b.v.**  
revalidatiehulpmiddelen

Klokhoeck 16B  
NL- 3833 GX LEUSDEN  
Tel.: 033-432 00 44  
Fax: 033-432 19 27  
E-mail: [info@sarkow.nl](mailto:info@sarkow.nl)  
Internet: [www.sarkow.nl](http://www.sarkow.nl)