

PROTAC[®]

INTEGRATING SENSES

Protac SensOn™
DK - Brugsvejledning



DK - Brugsvejledning

Protac SensOn™

Du har valgt et Protac kvalitetsprodukt. Protac garanterer at du har fået et originalt, dansk design produkt udviklet i samarbejde med faglige sparringspartnere. Protac har siden 1994 udviklet, produceret og solgt sansestimulerende hjælpemidler til sundhedssektoren i Danmark, Europa, Australien og New Zealand. Protacs produkter er udviklet ud fra teorier om sanseintegration og veldokumenteret i forskning, dokumentation og casebeskrivelser. Protac har i produktionsprocessen fokus på miljø og sikkerhed. Protacs plastikugler er TÜV godkendt, og metervarerne er Oeko-Tex certificeret.

DK

Mærkning

Produkterne er mærket iht. lovgivning om medicinsk udstyr. Label med mærkning er placeret indvendigt ved nederste kuglepose for at beskytte brugeren for gener ved brug. Placeringen beskytter også labelen mod slid.

Symbolforklaring på Label: der henvises til punktet **Symbol forklaring**

Generelle forsigtighedsregler - Sikkerhed

- ⚠ • **Må ikke**, uden opsyn, anvendes til brugere med dårlig balance
- ⚠ • **Må ikke**, uden opsyn, anvendes til brugere, som ikke kan tage vare på sig selv
- ⚠ • **Må ikke** bruges nær åben ild
- ⚠ • **Må ikke** bruges til at sove med om natten
- ⚠ • **Må ikke** bruges til børn under 3 år, da det indeholder småpartikler
- ⚠ • **Må ikke** bruges ved transport i køretøj, hverken af fører eller passagerer
- ⚠ • **Vær opmærksom** på brugerens reaktion.
- ⚠ • **Vær opmærksom** på ikke at snuble i kraven, hvis den falder på gulvet
- ⚠ • **Vær opmærksom** på, at kugleposerne nederst i ryggen tages ud, hvis brugeren sidder i kørestol.
- ⚠ • **Må ikke** varmes i mikroovn eller ved brug af andre varmekilder.

Produktets formål og anvendelsesmiljø

Sanseintegration danner grundlag for udviklingen af alle Protacs produkter. Denne teori kommer fra USA og er udviklet af A. Jean Ayres, ergoterapeut og psykolog, tilbage i 1970'erne. Teorien tager udgangspunkt i, hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk, og hvordan man kan påvirke de forskellige sansestimuli via tyngde og tryk i taktilsansen (berøringsansen) i huden og den proprioceptive sans (bevægelsesansen) i muskler og led. Kuglernes tryk, bevægelse og tyngde påvirker netop disse sanser.

Protac SensOn™ er udviklet som et hjælpemiddel til personer med funktionsnedsættelse.

- Børn, unge, voksne og ældre kan anvende Protac SensOn™
- Brugere med fysisk og psykisk uro
- Brugere med følgevirkning efter hjerneskade: manglende kropsopfattelse, ufrivillige bevægelser
- Brugere med Demens sygdomme
- Brugere med koncentrationsproblemer


- Protac SensOn™ afhjælper følgevirkninger hos hjerneskadede personer til at styrke f.eks. balance og kropsfornemmelse
- Til personer med fysisk og psykisk uro bruges Protac SensOn™ i forbindelse med koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, da tyngden og trykket af kuglerne giver ekstra sansestimuli og en øget kropsfornemmelse
- Personer med psykiatrisk sygdom som demens har ofte motorisk og psykisk uro
- Protac SensOn™ kan bruges til at skabe ro og tryghed for brugeren. Kuglernes tyngde og tryk giver ligeledes en bedre kropsfornemmelse og øget velvære.

Protac SensOn™ kan bruges i institutioner, bosteder, dagtilbud, hospitaler, opholdsrum og private rum. Skolebørn kan have Protac SensOn™ på i undervisningssituationen, hvor barnet skal være koncentreret om en arbejdsopgave. På institutioner kan brugeren have Protac SensOn™ på i spisesituationer. I private hjem kan brugeren have Protac SensOn™ på i spisesituationer eller ved lektielæsning, hvor der er brug for at øge koncentrationen.

DK

Anvendelse af produktet

Protac SensOn™ tages på, så str. mærket og pyntestikningen sidder midt i nakken – vær opmærksom på, at det bløde ensfarvede stof vender ind mod huden.

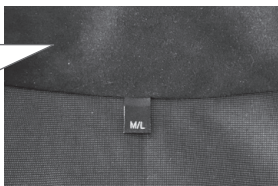

Protac SensOn™ lægges godt op i nakken og kuglerne fordeles med hænderne, så det føles ensartet og behageligt.



Protac SensOn™ kan evt. knappes under armene.



Kugleposerne nederst på ryggen skal tages ud, hvis man sidder i kørestol.



Levetid for produktet

Produktet har en forventet levetid på 2 år.

Levetid er baseret på korrekt brug, rengøring, vask, service og vedligehold.

Produkter som anvendes ud over den ovennævnte levetid, skal vurderes for fremtidig anvendelse. Det er brugeres ansvar løbende at vurdere, om produktet kan anvendes ud over den angivne levetid.

Rengøring

Protac SensOn™ kan vaskes. Interval og behov for vask af betrækket afhænger af anvendelse og brug. Ved vask og renholdelse af kraven, følges nedenstående anvisning.

- Protac SensOn™ kan vaskes i en vaskemaskine – min. 6 kg, med vaskepulver uden blegemiddel - se i øvrigt vaskeanvisning i Protac SensOn™.
- Den medfølgende vaskepose skal benyttes.

Vedligehold

Det anbefales at lufte kraven med jævne mellemrum.

Transport og opbevaring

Protac SensOn™ leveres klar til brug. Ved transport er Protac SensOn™ pakket i en bæretaske, som beskytter kraven mod snavs og fugt.

Protac SensOn™ opbevares bedst liggende og tildækket, så den er beskyttet mod snavs og fugt.

Bortskaffelse

Protac SensOn™ kan bortskaffes som brændbart affald. Affald bortskaffes efter gældende regler.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på produktionsfejl

Garanti bortfalder i følgende tilfælde:

- overbelastning af Protac SensOn™
- voldsomt brug af Protac SensOn™
- manglende eller forkert vedligehold af Protac SensOn™

Sporbarhed: der er markeret måned og år for produktion på vaskelabel

Symbol forklaring

Dette er kun eksempler, se den anbefalede vaskeanvisning på vaskelabel i produktet.



Vaskebalje:

Max. vasketemperatur (se vaskelabel)



Advarsel:

Se under punktet **Sikkerhed**



Trekant:

Må ikke bleges



Bruger information



Firkant med cirkel:

Tørretumbling (se vaskelabel)



Til indendørs brug



Strygejern:

Må ikke stryges



CE godkendelse direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EC Klasse 1



Cirkel:

Må ikke renses



Fabrikant



Serie nummer produkt (se vaskelabel)

Tekniske specifikationer

Standarder: Efterlever generelle krav til hjælpemidler ift. følgende harmoniserede standarder:

Klinisk evaluering: EN 12182:2012

Risikoanalyse: DS/EN ISO 14971

Service informationer

Der må ikke bruges andre kugler i Protac SensOn™ end de af fabrikanten brugte.

DK

Vejledning

- dagligt eftersyn af Protac SensOn™ inden anvendelse

Nr.	Check	Bemærkning
1	<ul style="list-style-type: none">• Alle dele er på plads, ingen løse dele	
2	<ul style="list-style-type: none">• Ingen tegn på huller, beskadigelser i stof og syninger	



Protac A/S

Niels Bohrs Vej 31 D, Stilling

DK-8660 Skanderborg

Tel.: 86 19 41 03

e-mail: protac@protac.dk

Oversigt over forhandlere: Der henvises til: www.protac.dk/kontakt

DK

3 - 6

