

Aanvullende praktische aanbevelingen:

Om het materiaal te beschermen, moet het Oliz® Koko-Nora product alleen binnen worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om beide handen te gebruiken bij het verplaatsen van het product. Trek niet aan het product, omdat dit schade kan veroorzaken en deze schade valt niet onder de garantie. Als je het product in een voertuig vervoert, moet het goed worden vastgemaakt om te voorkomen dat het rondvliegt en iemand verwondt. Als er een gat in het product zit, moet het onmiddellijk van de persoon worden verwijderd. Het Oliz® Koko-Nora product moet regelmatig op schade worden gecontroleerd, aangezien losse onderdelen en de inhoud gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen onder de 3 jaar en voor mensen met dementie. Mag niet in de magnetron of andere warmtebronnen worden geplaatst. Let op: als het product op de grond ligt, kan het valpartijen veroorzaken, dus verwijder het altijd na gebruik.

Milieu bescherming:

Help het milieu door het product niet in het huishoudafval te gooien. Knip het product in stukken en scheid de componenten zoals glas, plastic, stof en metaal volgens de lokale voorschriften – in de relevante recycling systemen.

Het glas dat in het product is gebruikt, is getest en is vrij van schadelijke stoffen.

Garantie:

Oliz® Koko-Nora biedt twee jaar garantie op productiefouten. Deze garantie is alleen geldig als het product correct wordt gebruikt. Schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik valt niet onder de garantie.

Voor verdere vragen over het gebruik van het Oliz® Koko-Nora product kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het product, Majbritt Hillerup. Het product kan in een tas worden vervoerd. Bij correct gebruik heeft u een product dat meer dan 2 jaar meegaat.

Bestelling:

Jaar:

Product: Groot Bent



EN21856:2022,

en getest volgens de norm EN71-1-2-3



De vriendelijke luiaard Bent helpt om ontspanning en geborgenheid in het dagelijks leven te brengen. Zijn uitnodigende uiterlijk en doeltreffende functionaliteit overtuigen zowel kinderen als volwassenen. Bent wekt vertrouwen, geeft een gevoel van veiligheid en kan worden gebruikt als een belangrijk communicatiemiddel tussen kinderen en volwassenen. Bent kan worden gebruikt door zowel kinderen als volwassenen die behoefte hebben aan het hervinden van het contact met zichzelf. **Lees altijd deze originele gebruiksaanwijzing en bewaar hem voor later gebruik.**

Groot Bent

Deens design – geproduceerd in de EU - www.oliz.dk
Oliz/Koko-Nora Aps - Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

Belangrijke instructies vóór gebruik van het product:



Oliz® Koko-Nora, de luiaard Bent, is een vriendelijk en uitnodigend luiaard van 4,5 kg, die helpt om ontspanning en geborgenheid in het dagelijks leven te brengen. Hij is er altijd wanneer iemand behoefte heeft aan een stevige knuffel. Een goede knuffel stimuleert de aanmaak van oxytocine, wat stress vermindert. Bent is een hulpmiddel dat mensen helpt om zich weer bewust te worden van hun lichaam en om tot rust te komen. Bent wekt vertrouwen, geeft een gevoel van veiligheid en kan worden gebruikt als een belangrijk communicatiemiddel tussen kinderen en volwassenen. Plaats Bent op de schoot van de persoon die behoefte heeft aan een knuffel, laat zijn armen rusten op de schouders van die persoon, en gebruik het elastiek rond de pols om de knuffel vast te houden. Als de persoon in de rug inzakt, moet het product onmiddellijk worden verwijderd. Oliz® Koko-Nora Bent is ontworpen voor personen vanaf 6 jaar.

Afmetingen: Hoogte 420 mm – Breedte 660 mm – Gewicht: 4,5 kg

Materiaal stof: 100% polyester

Materiaal binnenin: 20% glas, 80% polyester

Oliz® Koko-Nora maakt uitsluitend gebruik van materialen die geen kankerwerkende stoffen bevatten. Daarom zijn er geen vlamvertragende middelen in het product verwerkt.

Onderhoudsinstructies:

- Mag in de wasmachine gewassen worden op een fijnwasprogramma op 40 graden
- Niet bleken
- Niet strijken
- Niet geschikt voor de droger (mag in droge toestand 5–10 min. in de droger worden geplaatst)
- Niet chemisch reinigen

Verwijder vóór het wassen de losse zakjes die zich binnenin bevinden.

Oliz® raadt aan om oppervlakkig vuil met een vochtige doek en zeep te verwijderen en het product alleen af en toe te wassen, aangezien herhaaldelijk wassen slijtage kan veroorzaken.

(Bekijk het aparte document voor meer informatie)

Opslag: Om veiligheidsredenen raden wij aan om het Oliz® Koko-Nora product buiten het bereik te bewaren van personen die toezicht nodig heeft – bijvoorbeeld in een tas of iets dergelijks. Houd het Oliz® Koko-Nora product uit de buurt van scherpe of warme voorwerpen en open vuur.

(Tanden worden ook als scherpe voorwerpen beschouwd.)

Belangrijke instructies:

Plaats het luiaard-product Oliz® Koko-Nora Bent eerst op de schoot. Daarna kunnen de armen voorzichtig rond de hals van de persoon worden gelegd. Zie apart document. Het is belangrijk om de persoon tijdens het gebruik te observeren, aangezien het product een aanzienlijk gewicht heeft dat fysiek effect kan hebben. Een Oliz® Koko-Nora product mag alleen worden gebruikt met toestemming van de persoon. Als de persoon ongemak ervaart en het product herhaaldelijk afwijst, moet het worden verwijderd en niet meer worden gebruikt bij deze persoon. Let op dat de persoon niet te gewend raakt aan het product, zodat het effect behouden blijft. Als het product wordt geaccepteerd, moet het worden beschouwd als een hulpmiddel tegen onrust en stress, en alleen voor beperkte tijdsintervallen worden gebruikt – afhankelijk van de behoeften van de persoon. Begin bij het eerste gebruik met 5–10 minuten en kijk welk effect dit heeft, verhoog daarna geleidelijk de duur indien nodig. Let opnieuw op dat de persoon niet te afhankelijk wordt van het product, zodat de werking behouden blijft. Als de persoon met het product wil slapen, is dat ook mogelijk (zie echter de waarschuwingen). Zodra het gewenste effect is bereikt, moet het product voorzichtig worden verwijderd. Het product mag niet worden gegooid, omdat het gewicht zowel het product als mensen in de omgeving kan beschadigen of verwonden.

Waarschuwingen:



Als de persoon ernstige motorische en/of fysieke beperkingen heeft, moet het product met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt. Gebruik het product niet als de persoon het niet zelfstandig kan verwijderen! De persoon die een Oliz® Koko-Nora product gebruikt, mag tijdens gebruik niet in elkaar zakken in de rug. Als dit gebeurt, moet het product onmiddellijk worden verwijderd, omdat het gewicht schade aan de rug kan veroorzaken! Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen dat personen die een Oliz® Koko-Nora gebruiken, altijd onder toezicht staan tijdens gebruik. Na gebruik moet het product buiten het bereik van mensen worden gehouden die toezicht nodig hebben. Zorg ervoor dat de luchtwegen vrij blijven tijdens gebruik. Als de persoon moeite heeft met ademen, mag het product niet op de borst worden geplaatst, omdat het gewicht de ademhaling kan belemmeren en verstikkingsgevaar kan opleveren. Alle gewichtsproducten moeten met zorg worden gebruikt, omdat het gewicht o.a. de bloedcirculatie kan blokkeren. Een Oliz® Koko-Nora product mag niet in de buurt van water worden gebruikt, omdat er gevaar voor verdrinking bestaat. Als de persoon hart- of longproblemen heeft, moet men contact opnemen met de behandelend arts voordat het product wordt gebruikt.

