



Product: Poul

Buitenstof: 100% polyester

Inhoud: 40% glas, 60% polyester



Zorgvuldige wasinstructies:

Fijnwasprogramma: 30 graden- Niet bleken - Niet strijken -

Niet in de droger - Niet chemisch reinigen/niet stomen-

Wassen met vergelijkbare kleuren.

Geschikt voor kinderen vanaf 36 maanden. Geproduceerd in de EU. De-ens ontwerp. De wasinstructies staan aan de binnenkant van het product. Koko-Nora raadt aan om oppervlakkig vuil te verwijderen met een vochtige doek en zeep. Was het product slechts af en toe, omdat herhaaldelijk wassen slijtage kan veroorzaken en de garantie dit niet dekt. Gebruik alleen zeep/ desinfecterende zeep die geschikt is voor textiel. Voor het wassen moet het product worden geleegd van de inhoud. Volg de instructies die bij het product zijn geleverd bij ontvangst.

Bestelling:
Jaar:
Model: Poul



CE



Poul

NL: Lees en bewaar deze folder voor later gebruik.



De Oliz Koko-Nora® inktvis Poul is een verzwaringsdeken voor kinderen en personen met speciale behoeften, die moeite hebben met in slaap vallen of simpelweg een rustmoment nodig hebben gedurende de dag. Leg Poul op de dijen of buik/borst van de persoon en laat de armen het lichaam omsluiten en wanneer het bedtijd is. Dit zorgt voor een lichte druk op het lichaam. Wat er in het lichaam gebeurt bij drukstimulatie is dat oxytocine vrijkomt, wat stress vermindert en rust brengt in een onrustig lichaam. Bovendien heeft de zachte, bubbelachtige buitenkant een tactiele stimulatie die nieuwsgierige vingers uitnodigt om te verkennen. Wie weet, misschien zorgt Poul voor minder slapeloze nachten. Let er echter op dat de persoon het deken zelf moet kunnen verwijderen als ze willen slapen zonder het deken. Koko-Nora® heeft dit product met liefde ontworpen om kinderen van 5 jaar en ouder, die onrustig zijn, en personen met speciale behoeften een gevoel van veiligheid en zorg te bieden.

Afmetingen: Hoogte: 320 mm- Breedte: 630 mm Gewicht: 3,4 kg

Materiaal:

Stof: 100% polyester

Vulling: 40% Glas, 60% polyester

Oliz Koko-Nora® gebruikt uitsluitend materialen zonder kankerverwekkende stoffen. Daarom worden er geen brandvertragende middelen gebruikt in het product.

Andere praktische informatie:

Gebruik het product uitsluitend binnenshuis om het materiaal te beschermen. Houd het product uit de buurt van scherpe/warme voorwerpen en open vuur. Tandens worden beschouwd als scherpe voorwerpen; als iemand in het product bijt, kan dit gaten veroorzaken. Controleer het product daarom altijd voor gebruik.

Gebruik beide handen bij het verplaatsen van het product en trek er niet aan.

Berg het product na gebruik op in een tas buiten bereik van de persoon.

Bevestig het product tijdens transport in een voertuig om te voorkomen dat het rondvliegt en letsel veroorzaakt.

Als er een gat in het product zit, verwijder het dan onmiddellijk van de persoon. Controleer het product regelmatig op schade, aangezien losse onderdelen en de inhoud gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen onder de 3 jaar en mensen met dementie.

Plaats het product niet in een magnetron of andere warmtebron.

Let erop dat het product op de grond struikelgevaar kan veroorzaken; verwijder het product daarom altijd na gebruik.

Milieubescherming:

Help het milieu door het product niet bij het huishoudelijk afval te gooien.

Knip het product in stukken en sorteer de afzonderlijke componenten, zoals plastic, glas en stof, volgens de lokale voorschriften in de juiste recyclingssystemen.

Het glas dat we gebruiken is getest en vrij van schadelijke chemicaliën, dat kunnen we bewijzen.

Belangrijk:

Zorg ervoor dat het product correct wordt gebruikt volgens de gegeven instructies.

Het is belangrijk om de gebruiker tijdens het gebruik te observeren, omdat het product een aanzienlijk gewicht heeft dat het lichaam fysiek kan beïnvloeden. Een Koko-Nora-product mag alleen worden gebruikt met toestemming van de gebruiker.

Als de gebruiker ongemak ervaart tijdens het gebruik en het product herhaaldelijk afwijst, moet het worden verwijderd en niet meer worden gebruikt bij deze persoon.

Als het product wordt geaccepteerd, moet het worden beschouwd als een hulpmiddel tegen onrust en stress en in beperkte tijdsintervallen worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Bij het eerste gebruik is het aan te raden om te beginnen met 5-10 minuten om het effect te beoordelen. Verhoog daarna de duur naar behoefte. Let erop dat de gebruiker niet te gewend raakt aan het product, zodat het effect behouden blijft. Het is echter toegestaan om met dit product te slapen als dat wenselijk is. Wanneer het gewenste effect is bereikt, moet het product voorzichtig worden verwijderd. Het mag niet worden gegooid, omdat het gewicht schade kan veroorzaken aan zowel het product als personen in de buurt.

Waarschuwingen:

Als de gebruiker ernstige motorische en/of fysieke beperkingen heeft, moet het product met extra zorg worden gebruikt.

Gebruik het product niet als de persoon het niet zelf kan verwijderen! Wij raden over het algemeen aan dat gebruikers van een Koko-Nora®-product tijdens het gebruik worden geobserveerd om veiligheidsredenen. Na gebruik moet het product buiten bereik worden gehouden van personen die toezicht nodig hebben.

Zorg ervoor dat de luchtwegen vrij blijven tijdens het gebruik van het product. Als de gebruiker moeite heeft met ademen, mag het product niet op de borst worden geplaatst, omdat het gewicht de ademhaling negatief kan beïnvloeden en verstikkingsgevaar kan veroorzaken.

Alle producten met gewicht moeten voorzichtig worden gebruikt, omdat het gewicht bijvoorbeeld de bloedcirculatie kan belemmeren.

Een Koko-Nora®-product mag niet in de buurt van water worden gebruikt, omdat dit kan leiden tot verdrinkingsgevaar.

Garantie:

Bij productiefouten biedt Koko-Nora® een garantie van twee jaar.

Deze garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt zoals bedoeld. Schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik valt buiten de garantie. Het product kan worden vervoerd in een tas. Bij correct gebruik heeft u een product dat langer dan twee jaar meegaat.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het product, Majbritt Hillerup.

Zorg ervoor dat u deze originele gebruiksaanwijzing bewaart voor later gebruik.