

DUTCH:

Oliz Koko-Nora® Rita is een verzwaard ezeltje voor mensen die moeite hebben met inslapen of gewoon behoefte hebben aan een rustmoment gedurende de dag. Leg Rita op de buik- of borststreek en laat de poten langs de zijkanten van het lichaam hangen – zo voelt men het zachte gewicht dat druk uitoefent op het lichaam. Wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan drukstimulatie, komt oxytocine vrij – het natuurlijke anti-stresshormoon van het lichaam. Rita heeft oren die prettig zijn om aan te friemelen en die ook tactiele stimulatie bieden. Rita kan ook worden gebruikt voor motorische oefeningen en spelletjes die het evenwicht versterken en de spier- en gewrichtszin (proprioceptie) stimuleren.

TIL RITA NOOIT ALLEEN AAN DE OREN, DE STAART OF HET HAAR!

Wie weet zorgt Rita misschien ook wel voor minder slapeloze nachten.

Let er wel op dat als iemand met Rita slaapt, die persoon zelf in staat moet zijn om haar te verwijderen, als ze zonder willen slapen.

Het Oliz Koko-Nora®-product is met hart en ziel ontworpen om veiligheid en geborgenheid te bieden – vanaf 5 jaar.

Afmetingen: Hoogte: 190 mm – Breedte: 570 mm – Lengte: 540 mm – Gewicht: 3 kg

Materialen:

Buitenstof: 100% polyester

Binnenvulling: • 97% polyethyleen • 3% polyester

Oliz Koko-Nora® gebruikt uitsluitend materialen die geen kankerverwekkende stoffen bevatten.

Daarom zijn er geen vlamvertragende middelen in het product verwerkt.

Overige praktische informatie:

De wasinstructies bevinden zich aan de onderzijde van het product. Oliz Koko-Nora® raadt aan om oppervlakkig vuil te verwijderen met een vochtige doek en wat zeep.

Was het product alleen af en toe, aangezien herhaaldelijk wassen slijtage veroorzaakt – en schade hierdoor valt niet onder de garantie. Om het materiaal te beschermen, mag het product alleen binnenshuis worden gebruikt. Houd het uit de buurt van scherpe of hete voorwerpen en open vuur. Oliz Koko-Nora® zou graag garanderen dat onze producten bestand zijn tegen alle soorten bijten – maar dat kunnen we helaas niet. Tand worden beschouwd als zeer scherpe objecten, en als iemand in het product bijt, kan er schade ontstaan. Controleer het product daarom altijd vóór gebruik. Gebruik twee handen bij het verplaatsen van het product, en til het niet op aan de oren, het haar of de staart. Bij vervoer in een voertuig moet het product goed worden vastgezet om te voorkomen dat het rondvliegt en letsel veroorzaakt.

Als er een gat in het product zit, moet het onmiddellijk bij de persoon worden weggehaald. Controleer het product regelmatig op schade, want losse onderdelen of de inhoud kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen onder de 3 jaar en mensen met dementie. Plaats het product niet in de magnetron of bij een warmtebron.

NIEUWS!

Als je merkt dat de vulling in het product te stijf of hard is geworden, kun je de rits aan de voorkant openen om de vulling in de staart en het hoofd te verwijderen en te vervangen door nieuwe, frisse watten. Vul opnieuw totdat je vindt dat hoofd en staart weer precies goed zijn. Vergeet niet om de rits terug onder het kleine stukje stof te schuiven, zodat nieuwsgierige kinderen er niet bij kunnen.

Dit helpt om de levensduur van het product aanzienlijk te verlengen!

Milieubescherming:

Help het milieu door het product niet bij het huisvuil te gooien. Knip het product in stukken en scheid de verschillende onderdelen – zoals plastic en stof – volgens de lokale regelgeving en lever ze in bij de juiste recyclingsystemen.

Waarschuwingen:

Als de persoon ernstig beperkt is in motorische en/of fysieke vaardigheden, moet het product met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt. Gebruik het product niet als de persoon het niet zelfstandig kan verwijderen! Om veiligheidsredenen raden wij aan dat personen die een Oliz Koko-Nora®-product gebruiken, altijd onder toezicht staan tijdens het gebruik. Na gebruik moet het product buiten bereik worden gehouden van personen die toezicht nodig hebben. Zorg ervoor dat de luchtwegen vrij blijven tijdens het gebruik. Als de persoon moeite heeft met ademen, mag het product niet op de borst worden geplaatst, omdat het gewicht de ademhaling kan beïnvloeden en verstikkingsgevaar kan veroorzaken. Alle verzwaarde producten moeten met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat het gewicht onder andere de bloedcirculatie kan belemmeren. Een Oliz Koko-Nora®-product mag niet in de buurt van water worden gebruikt, omdat dit verdrinkingsgevaar kan opleveren. Gebruikers van een Oliz Koko-Nora®-product moeten altijd onder toezicht staan.

Garantie:

Bij fabricagefouten geeft Oliz Koko-Nora® twee jaar garantie.

Deze garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt zoals bedoeld.

Schade als gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik valt niet onder de garantie. Het product kan worden vervoerd in een tas. Bij correct gebruik heb je een product dat lang meegaat.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor het product: Majbritt Hillerup.

Bewaar deze originele handleiding goed voor toekomstig gebruik.