

**Snoezle**<sup>®</sup> 'n met een statief,  
een woordje uitleg.

Snoezle

snoezle is een  **pendulum** product

**1** **Onderdelen** - P2

**2** **Statief  
monteren** - P3

**3** **Hoogte instellen** - P4

**4** **Snoezle® aan statief  
hangen** - P6

1

## Onderdelen

het statief



de kapstok



de haak

Dankzij het statief kan je je Snoezle bijna overal monteren: boven een stoel of rolstoel, over een zetel,...



## 2 Samenstellen





3

## Hoogte instellen



draai aan deze ring om de hoogte in te stellen.



4

## Snoezle® aan statief hangen



↓ de witte ledstrip past in de uitsparing van de kapstok



> zicht van in de Snoezle tent



> zicht bovenaan door de rits opening

4

## Snoezle® aan statief hangen



2



Positioneer de tenstok in de haak zodat de Snoezle recht gehouden wordt



# Snoezle®

[www.snoezle.be](http://www.snoezle.be)

Snoezle is een pendulum product  
Contacteer ons via [info@pendulum.care](mailto:info@pendulum.care)

[www.pendulum.be](http://www.pendulum.be)

ontdek meer  
op de website  
[www.snoezle.be](http://www.snoezle.be)

