

Klaar voor een **Snoezle**[®] ervaring?

Lees mij eerst !



snoezle is een  pendulum product

1 Hallo, ik ben **Snoezle**[®]

inleiding - P3

2 Maak je **Snoezle**[®] klaar

voor het eerste gebruik - P4

3 Leer je **Snoezle**[®] beter kennen

tot in de puntjes - P9

4 Berg je **Snoezle**[®] op


zodat hij geen plaats inneemt - P15

1

Hallo, ik ben Snoezle®

inleiding

ontdek meer
op de website
www.snoezle.be

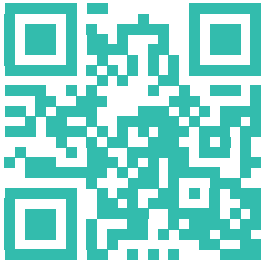


De Snoezle.

Een product ontwikkeld voor en door de zorg.

Snoezelen (snuffelen & doezelen) is een activiteit die aangeboden wordt aan een grote groep mensen waaronder personen met een verstandelijke beperking, gevorderde dementie, of andere. De persoon wordt gedurende kortere of langere tijd in een multisensorische ruimte gelegd waar gedempte lichteffecten, beelden en geluiden een prikkelende of kalmerende invloed uitoefenen. Snoezelen gebeurt vaak in een snoezelkamer maar Snoezle brengt de snoezel ervaring op een mobiele manier tot bij de gebruiker, in zijn of haar vertrouwde omgeving.

Design by Pilpili.

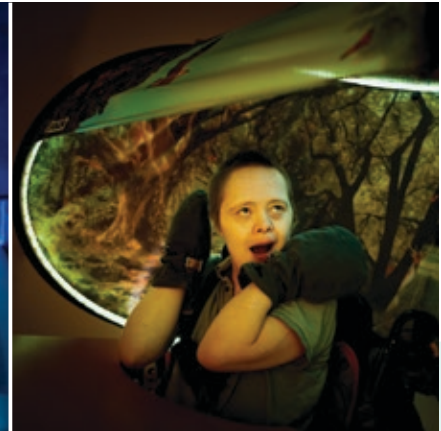

2

Maak je Snoezle® klaar

voor het eerste gebruik

2.1 in de verpakking ...



snoezle tent *

De tent is gemaakt uit textiel met een kleurige opdruk in een thema naar keuze. De rand is voorzien van een flexibele meerkleurige ledstrip. Gebruik de Snoezle tent enkel binnenshuis.



snoezle module *

Alle elektronica zit in een aparte module. Deze verzorgt de sturing van de leds en bevat daarnaast ook 2 luid-sprekers voor het geluid. Een bedieningspaneel op de module zorgt ervoor dat je de scènes kan starten, stoppen alsook het volume en de licht-intensiteit regelen.

* **garantie**

Snoezle gebruikers zijn vaak geen doetjes. Zowel de Snoezle tent als Snoezle module worden gratis vervangen bij defect of breuk. Deze garantieperiode bedraagt 2 jaar. Alleen als zou blijken dat u de Snoezle niet op de juiste wijze heeft gebruikt of geïnstalleerd zijn de vervangingskosten voor uw eigen rekening.

2

Maak je Snoezle® klaar

voor het eerste gebruik

2.2 snoezle tent



1

Verwijder de elastiek om de snoezle te laten openspringen.



! OPGELET !

Kijk na of je genoeg ruimte hebt en of er geen personen in de weg staan.



2

Zet de tent op de gewenste plaats.

2

Maak je Snoezle® klaar

voor het eerste gebruik

2.3 snoezle module



1

Richt de luidsprekers (de kant met de gaatjes) naar de tent en plaats de module op de voorziene plaats in de twee elastieken.



2

Plug de module op de connector. Je hoort een 'klik' als deze correct geplaatst is



2

Maak je Snoezle® klaar

voor het eerste gebruik

2.3 Snoezle module



3

Verbind de module met de stroomkabel en steek de stekker in het stopcontact.



4

Start de module door op de -toets te drukken. (Voor uitleg van de knoppen zie pagina 8.)



Heeft u een Snoezle met batterij?

Dan dient u eerst de batterij op te laden in de meegeleverde lader. (De batterij laadt niet op in de module.) Vervolgens kan u de batterij aan de onderkant van de module inpluggen en deze starten zonder stroom.

Meer info over het inpluggen van de batterij, zie pg13

2

Maak je Snoezle® klaar

voor het eerste gebruik


2.3 snoezle module

aan/uit

Druk kort om aan te zetten.
Om uit te schakelen hou je de toets even ingedrukt.

>> scenes

De module bevat 6 verschillende scènes:
thema Onder Water, thema Het Bos &
thema Aan Zee. Elk thema bestaat in twee versies:
een intense en rustige modus.

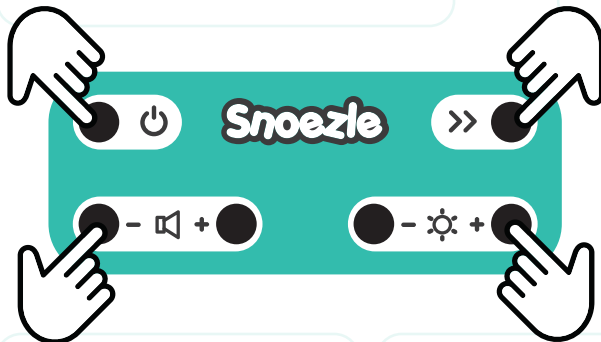

 volume

 helderheid

Onder Water

1. intense* modus
start: knipperende
blauwe leds
2. rustige** modus
start: oplichtende
blauwe leds

Het Bos

3. intense* modus
start: knipperende
groene leds
4. rustige** modus
start: oplichtende
groene leds

Aan Zee

5. intense* modus
start: knipperende
gele leds
6. rustige** modus
start: oplichtende
gele leds

* De **intense modus** is een meer prikkelende modus. In deze modus is er wat meer activiteit in licht en geluid.

** De **rustige modus** is meer relax, minder prikkelend.

3

Leer je Snoezle® beter kennen

tot in de puntjes

3.1 waar plaatsen?

1

op de grond



2

op een bed



3

op het statief
(dit is een accessoire, kan
apart besteld worden)




3

Leer je Snoezle® beter kennen

tot in de puntjes

3.2 handige opbergzakjes

Hierin vindt je handleiding een mooi plaatsje, je kan er ook je voeding en voedingskabel in opbergen...

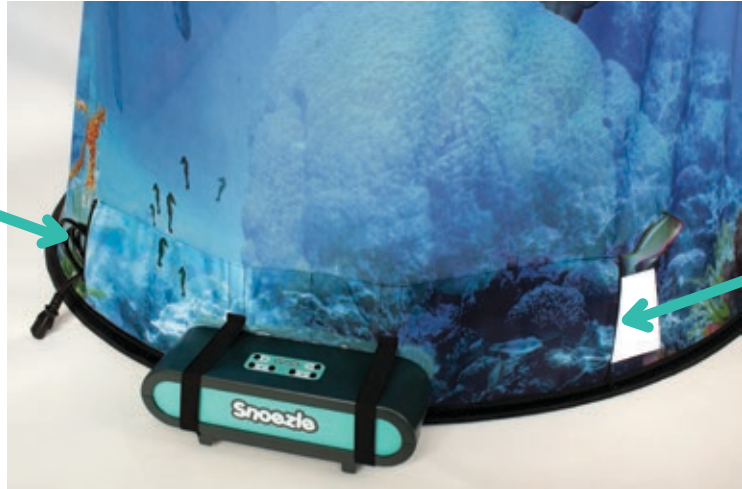

3.3 openritsbaar dak

Dit maakt het gemakkelijk om de gebruiker even te observeren zonder hem of haar te storen!



3

Leer je Snoezle® beter kennen

tot in de puntjes

3.4 Lusjes om je eigen knuffeltjes dicht bij jou te houden

Aan de binnenzijde zijn meerdere lusjes voorzien.
Hierdoor kan je voor iedere gebruiker zijn eigen plekje personaliseren.



> Knuffels zijn niet meegeleverd.

3




Leer je Snoezle® beter kennen

tot in de puntjes

3.5 onderhoud

De beste manier om jou Snoezle te reinigen is gebruik te maken van universele desinfectiedoekjes, voor het desinfecteren en reinigen van medisch apparatuur en medische oppervlakken.

Een grondige reiniging kan door het textiel los te ritsen van het tentframe. Het textiel kan gewassen worden in een handwas programma aan max 60°C, geen bleekmiddel, geen droogkast, hangend laten drogen.

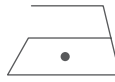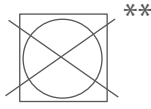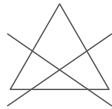

*
wassen kan de brandvertragende eigenschap verminderen

**
hangend laten drogen



1

Start met het uitrusten van het dak van de Snoezle.

Rits vervolgens de grote textiel volledig los van de led-strip.

De Led-strip zal een ronde vorm aannemen. Je laat deze best tijdens het wassen van de textiel in zijn ronde vorm liggen.

2



3

Leer je Snoezle® beter kennen

tot in de puntjes

3.6

accessoires

(deze kan je als extra aankopen op de webshop)

batterij set met lader

Als je Snoezle niet voorzien is van een batterij kan je deze hiermee nog steeds uitbreiden! Handig als je je Snoezle vaak wil verplaatsen.

Met deze set krijg je twee batterijen, een duolader met snoer voor netstroom of voor in de wagen.



Plug de batterij in de module



**Let op, de batterij laadt niet op in de module (zelf al is deze aangesloten op de stroom.)
Je kan de batterij enkel opladen in de daarvoor voorziene lader.**

statief

Dankzij dit statief kan je je Snoezle bijna overal monteren:
boven een stoel of een rolstoel, een zetel ...
De hoogte is instelbaar. Zeer eenvoudig in gebruik.



draai aan deze
ring om de hoogte
in te stellen.



4

Berg je Snoezle® op


zodat hij geen plaats inneemt

4.1 snel en eenvoudig opbergen

De module verwijderen is niet nodig.


De tent wordt gewoon in twee gevouwen, **super eenvoudig**.

Op die manier kan je de Snoezle even verplaatsen of opzij te zetten.

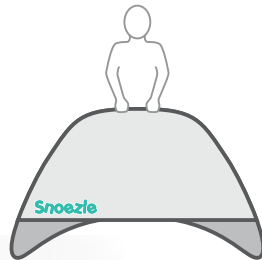

1


sta achter je Snoezle

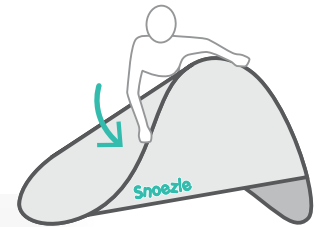

2

duw één zijde naar beneden



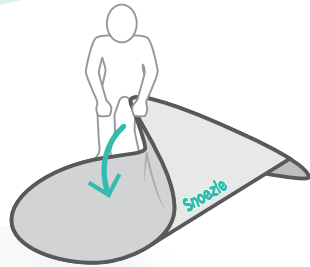

3

leg de andere zijde erover




4

platdrukken



5

elastiek erond...
en klaar!

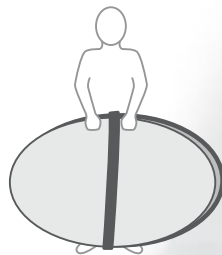

‘ We wensen je
veel **Snoezle** plezier! ’





End of **Snoezle**® life

Heeft je snoezle het einde van
zijn leven bereikt ?

Je kan ons je oude snoezle
terug bezorgen. Wij recycleren
hem en geven bepaalde delen
een tweede creatief leven.

Kanonstraat 44
8500 Kortrijk
België

The logo for Snoezle, featuring the word "Snoezle" in a white, rounded, bubbly font with a teal outline. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'e'.

Snoezle[®]

Snoezle is een pendulum product
Contacteer ons via info@pendulum.care

www.pendulum.be

design by pilipili