

Aanvullende praktische aanbevelingen:

Om het materiaal te beschermen, mag u het Oliz Koko-Nora®-product alleen binnenshuis gebruiken. Houd het product uit de buurt van scherpe/hete voorwerpen en open vuur. Oliz Koko-Nora® zou graag willen garanderen dat onze producten bestand zijn tegen alle soorten bijten, maar dat kunnen we niet. Tandjes worden beschouwd als zeer scherpe voorwerpen, dus als de burger in het product bijt, kan er een gat in het product ontstaan. Controleer het product daarom altijd voor gebruik. Gebruik het product niet voor personen die bijten. Het wordt aanbevolen om beide handen te gebruiken wanneer het product moet worden verplaatst, en het product mag niet aan de opgenaaid details worden getrokken. Als u het product in een voertuig vervoert, moet het product worden vastgezet om te voorkomen dat het rondvliegt en iemand verwondt. Als er een gat in het product zit, moet het product onmiddellijk bij de burger worden verwijderd. Het Oliz Koko-Nora®-product moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd, aangezien losse voorwerpen en de inhoud gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar en mensen met dementie.

Met betrekking tot milieubescherming:

Help het milieu door het product in stukken te knippen en de afzonderlijke componenten, zoals plastic, stof, glas en metaal, volgens de lokale voorschriften te sorteren in de daarvoor bestemde recyclingbakken.

Garantie:

Bij fabricagefouten biedt Oliz Koko-Nora® twee jaar garantie. Deze garantie is alleen geldig als het product volgens de voorschriften wordt gebruikt. Schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik is uitgesloten van de garantie. Voor verdere vragen over het gebruik van het Oliz Koko-Nora®-product kunt u contact opnemen met de productverantwoordelijke Majbritt Hillerup. Het product kan in een tas worden vervoerd. Bij correct gebruik gaat het product meer dan twee jaar mee.

Bestelling: jaar: 2025 Product: Henric



getest volgens de norm EN71-1-2-3, Samt EN21856:2022



Henric helpt mensen met dementie die in zichzelf gekeerd zijn en weinig prikkels krijgen, weer wakker te worden. Gebruik Henric voor mensen die graag wat meer wakker willen zijn, want Henric heeft gewicht in zijn achterwerk, gewicht in zijn benen en je kunt zijn handen vasthouden, wat hen een gevoel van nabijheid en veiligheid geeft. Henrics lengte helpt de burger om meer rechtop te blijven zitten en een betere houding aan te nemen.

Lees en bewaar deze originele gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

Henric

Deens design - geproduceerd in de EU - www.oliz.dk
Oliz/ Koko-Nora - Orionvej 2a- 7430 Ikast - DK - tlf +45 20 78 79 54

Belangrijke instructies voor het gebruik van het product: ⚠

Oliz Koko-Nora® Henric is een pop van 3 kg die wordt gebruikt om burgers met bijvoorbeeld dementie te stimuleren. De burgers die in elkaar zakken en wegzakken, die graag in staat van opwinding willen komen, zullen veel baat hebben bij Henric, omdat hij zwaar is in zijn achterwerk, benen en handen, wat hen een gevoel van nabijheid en veiligheid geeft. De rode details helpen om de aandacht te vestigen op het feit dat hier iets gebeurt. De samenstelling van het gewicht van Henric is zo gemaakt dat wanneer ze hem vasthouden, het prettig aanvoelt, omdat het helpt om de tactiele behoefte te activeren die ze meestal hebben. De hoogte van Henric helpt de burger om zich meer rechtop te houden en een betere houding aan te nemen. Het kan ook leiden tot meer dialoog tussen de burger en Henric, omdat sommige mannen die bij hem zitten zich misschien kunnen identificeren met het kleine potlood en de hamer uit hun eigen werkzame leven. Als hij wordt gebruikt om mee te slapen, kan hij bovenop de burger liggen en kunnen ze hun handen in zijn achterzakken steken, waardoor ze weer hun handen kunnen afbakenen.

Oliz Koko-Nora® Henric is ontworpen voor personen vanaf 15 jaar.

Afmetingen: hoogte 720 mm - breedte 310 mm Gewicht: 3 kg

Materiaal stof:	100% polyester
Materiaal binnenkant:	40% Glas - 60% polyester
Materiaal broek:	100% katoen
Materiaal blouse:	95% katoen - 5% lycra

Oliz Koko-Nora® gebruikt alleen materialen die geen kankerwekken-de stoffen bevatten. Daarom zijn er geen vlamvertragers gebruikt in het product.

Onderhoudsinstructies:

- Mag in de wasmachine op 30 graden op een fijnwasprogramma worden gewassen
- Mag niet worden gebleekt.
- Mag niet worden gestreken.
- Niet geschikt voor de droogtrommel.
- Mag niet worden chemisch gereinigd.



Voordat u het product wast, moet u de losse zakjes die erin zitten verwijderen, zie apart document. Apart wassen. De wasinstructies staan in het product. Oliz Koko-Nora® raadt aan om oppervlakkig vuil te verwijderen met een vochtige doek en zeep en het product slechts af en toe te wassen, omdat herhaaldelijk wassen het product zal slijten. Gebruik desinfecterende zeep die geschikt is voor textiel.

Mag niet in de magnetron of andere warmtebron worden geplaatst.

Belangrijk:

Het is belangrijk om de burger tijdens het gebruik in de gaten te houden, omdat het product behoorlijk zwaar is en dat kan invloed hebben op het lichaam. Een Oliz Koko-Nora®-product mag alleen worden gebruikt met toestemming van de burger. Als de burger zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van het product en het product meerdere keren afwijst, moet het product worden verwijderd en niet voor deze persoon worden gebruikt. Als het product wordt geaccepteerd, moet het worden gezien als een hulpmiddel tegen lage arousal en worden gebruikt in beperkte tijdsintervallen, afhankelijk van de behoeften van de burger. Begin bij het starten van het gebruik van dit product met 5-10 minuten en kijk welk effect het heeft. Verhoog vervolgens de tijdsinterval naar behoefte. Let erop dat de burger niet te gewend raakt aan het product, zodat het effect niet afneemt. Als de burger met het product wil slapen, is dat ook mogelijk. Wanneer het gewenste effect is bereikt, moet het product voorzichtig worden verwijderd. Het product mag niet worden gegooid, omdat het gewicht ervan schade kan veroorzaken aan zowel het product als aan personen in de buurt van het product.

Waarschuwingen:

Als de burger sterk beperkt is door motorische en/of fysieke omstandigheden, moet het product met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt. Gebruik het product niet als de burger het niet zelf kan verwijderen! Om veiligheidsredenen raden wij in het algemeen aan om personen die een Oliz Koko-Nora®-product gebruiken tijdens het gebruik te begeleiden. Na gebruik van het product moeten burgers die toezicht nodig hebben buiten het bereik van het product worden gehouden.

Houd de luchtwegen vrij wanneer het product wordt gebruikt. Als de burger moeite heeft met ademen, mag het product niet op de borst worden geplaatst, omdat het gewicht een negatief effect kan hebben op de ademhaling en verstikkingsgevaar kan opleveren. Alle producten met gewicht moeten met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat het gewicht onder andere de bloedcirculatie kan blokkeren. Een Oliz Koko-Nora®-product mag niet in de buurt van water worden gebruikt, omdat dit kan leiden tot verstikkingsgevaar.

Als het product op de grond ligt, kan dit valschade veroorzaken. Houd daarom personen die het product gebruiken onder toezicht en verwijder het product na gebruik.

Garantie:

Bij productiefouten geeft Oliz Koko-Nora® twee jaar garantie. Deze garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt zoals bedoeld. Schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik is uitgesloten van de garantie. Het product kan in een tas worden vervoerd. Bij correct gebruik gaat het product lang mee.