

Aanvullende praktische aanbevelingen:

Oliz/Koko-Nora® producten mogen alleen binnenshuis worden gebruikt om het materiaal te beschermen. Houd het product uit de buurt van scherpe/ hete voorwerpen en open vuur. Oliz/Koko-Nora® wil graag garanderen dat onze producten bestand zijn tegen alle soorten beten, maar dat kunnen we niet. Tandjes worden beschouwd als zeer scherpe voorwerpen, dus als iemand op het product bijt, kan het breken. Controleer het product daarom altijd voor gebruik. Gebruik het product niet voor mensen die bijten.

Het wordt aanbevolen om beide handen te gebruiken bij het verplaatsen van het product en het product niet te verslepen. Als het product in een voertuig wordt vervoerd, moet het worden vastgezet om te voorkomen dat het rondvliegt en schade veroorzaakt.

Als er een gat in het product zit, moet het onmiddellijk van de persoon verwijderd worden. Oliz/Koko-Nora® producten moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade, omdat losse voorwerpen en inhoud gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar en mensen met dementie. Zet het product niet in de magnetron of andere warmtebronnen.

Wat betreft milieubescherming:

Help het milieu door uw product niet bij het huisvuil te gooien. Snijd het product in stukken en verdeel de afzonderlijke componenten, zoals plastic, glas, stof en metaal, volgens lokale voorschriften - in de juiste recycling systemen.

Garantie:

In geval van fabricagefouten biedt Oliz® een garantie van twee jaar. Deze garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt zoals bedoeld. Schade veroorzaakt door onjuist of ongepast gebruik valt niet onder de garantie.

Voor verdere vragen over het gebruik van het Oliz/ Koko-Nora® product kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor het product, Majbritt Hillerup. Het product kan worden vervoerd in een tas. Bij juist gebruik heeft u een product dat meer dan 2 jaar meegaat.

Bestelnr:

Klein Lise



Goedgekeurd door/ EN 71-1, 71-2, 71-3 EN21856:2022



Kleine Lise helpt burgers met dementie die inzakken en in slaap vallen, en die worden aangemoedigd om alerter te worden. Kleine Lise heeft gewicht in haar onderlichaam, benen en handen, waardoor ze een gevoel van nabijheid en comfort biedt. De hoogte van Kleine Lise draagt bij aan het rechter op zitten van de burger en het bereiken van een betere houding.

Lees en bewaar deze originele handleiding voor toekomstig gebruik.

Kleine Lise

Geproduceerd in de EU. Deens design

Oliz/Koko-Nora Aps - Orionvej 2 - 7430 Ikast - Denmark +45 20787954

Dutch:



Oliz/ Koko-Nora® Little Lise is een zware pop van 2,7 kg die mensen met dementie zal helpen ontwaken. Little Lise heeft gewicht in haar billen, benen en handen, waardoor ze een gevoel van comfort en veiligheid geeft. De kleur rood helpt de aandacht te vestigen op het feit dat er hier iets gebeurt, want rood helpt vaak om mensen met dementie te prikkelen. De samenstelling van het gewicht in Little Lise is precies zo gemaakt, dat wanneer ze vastgehouden wordt fijn aanvoelt, omdat het helpt de aanraakbehoefte die er is, te activeren. De grootte van Little Lise zorgt ervoor dat de persoon meer rechtop komt te staan en een betere houding krijgt. Het kan ook zorgen voor meer interactie tussen de persoon en Little Lise.

Oliz/ Koko-Nora® Little Lise is ontworpen voor mensen vanaf +15 jaar en voor mensen met dementie.

Afmetingen: hoogte 720mm - breedte 310mm Gewicht: 2,7 kg

Materiaal v/d stof: 90% Polyester- 10% Spandex

Materiaal binnenin: 40% Glas 60% Polyester

Materiaal v/d jurk: 100% Katoen

Oliz/Koko-Nora® gebruikt alleen materialen die geen kankerverwekkende stoffen bevatten. Daarom zijn op het product geen vlamvertragers gebruikt.

Wasinstructies:

Zachte was 30gr.

Niet bleken.

Niet strijken.

Niet in de droger.

Maak niet schoon.



Voordat u het product wast, verwijdert u de losse zakjes binnenin, zoals aangegeven in het aparte document. De wasinstructies zitten bij het product. Oliz/ Koko-Nora® raadt aan oppervlakkig vuil te verwijderen met een vochtige doek en zeep, en het product slechts af en toe te wassen, aangezien herhaaldelijk wassen tot slijtage van het product leidt. Apart wassen. Gebruik indien mogelijk en nodig desinfecterende zeep die geschikt is voor het wassen van textiel.

Belangrijk:

Het is belangrijk om de persoon tijdens het gebruik in de gaten te houden, want het product is zwaar en dat kan het lichaam fysiek beïnvloeden. Een Oliz/Koko-Nora® product mag alleen worden gebruikt met toestemming van de persoon. Als de persoon zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van het product en het product meerdere malen weigert, moet het product worden verwijderd en mag het niet voor deze persoon worden gebruikt. Als het product wordt aanvaard, kan het worden beschouwd als een hulpmiddel voor mensen met een lage opwindning en kan het voor beperkte tijdsintervallen worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften van de persoon. Als u met het gebruik van dit product begint, begin dan met 5-10 minuten en kijk welk effect het heeft; verhoog vervolgens het tijdsinterval indien nodig. Zorg ervoor dat de persoon niet te veel gewend raakt aan het product waardoor het effect kan verminderen. Als de persoon met het product wil slapen, is dit ook mogelijk, maar de persoon moet het product zelf kunnen verwijderen indien deze zonder wil slapen. Zodra het gewenste effect is bereikt, moet het product voorzichtig worden verwijderd. Gooi niet met het product, want het gewicht erin kan schade veroorzaken aan het product, maar ook aan mensen in de omgeving van het product.

Waarschuwingen:

Als de persoon ernstige motorische en/of lichamelijke beperkingen heeft, moet het product met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt. Gebruik het product niet als de persoon het niet zelf kan verwijderen!

Als het product op de vloer valt, moet er extra aandacht worden besteed aan de personen in de omgeving van het product, omdat dit valletsel kan veroorzaken bij de personen in de buurt van het product. Verwijder het product na gebruik. Om veiligheidsredenen bevelen wij in het algemeen aan dat personen die een Oliz/Koko-Nora® product gebruiken tijdens het gebruik onder toezicht staan. Na het gebruik van het product moeten de personen die toezicht nodig hebben buiten het bereik van het product blijven. Houd de luchtwegen vrij wanneer u het product gebruikt. Plaats het product niet op de borst als de persoon moeite heeft met ademen, omdat het gewicht een negatief effect kan hebben op de ademhaling en verstikkingsgevaar kan veroorzaken. Alle producten met gewicht moeten met voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien het gewicht bijvoorbeeld een blokkering van de bloedsomloop kan veroorzaken. Een Oliz/Koko-Nora® product mag niet in de buurt van water worden gebruikt, omdat het verdrinking kan veroorzaken.