

Dutch:

Het Oliz Koko-Nora® product de eekhoorn Eric een verzwaarde knuffel voor jonge kinderen die moeite hebben met inslapen dan wel even een rustmoment in de dag nodig hebben.

Laat het lichaam van Eric op de buik/borst rusten en leg de benen naast het lichaam, dit zorgt voor diepe druk op het lichaam. Wanneer een lichaam blootgesteld is aan prikkels, dan is diepe druk helpend, er komt dan namelijk Oxytocine vrij hetgeen zorgt voor afname van stress en helpt het lichaam tot rust komen. Eric heeft oren en "noten" in de wangen wat ook tactiele stimulatie geeft.

Eric kan ook gebruikt worden bij het oefenen van de motoriek en spelmomenten. Het gewicht stimuleert evenwicht en de sensomotorische ontwikkeling. Wanneer het kind de verzwaarde knuffel optilt van de grond worden ze eveneens fysiek flink aan het werk gezet, dit maakt het spelen met Eric uitdagend.

De verzwaarde knuffel Eric kan bijdragen aan het verbeteren van de slapeloze nachten...maar let op, de persoon die verzwaringsdeken gebruikt, moet in staat zijn deze zelf weg te kunnen leggen, in het geval ze liever zonder slapen.

De Oliz Koko-Nora® verzwaarde knuffel is ontwikkeld uit liefde, om rust en veiligheid te bieden, voor kinderen die rusteloosheid en prikkelbaarheid ervaren bij het slapen gaan en gedurende de dag. Geschikt voor +3 jaar en ouder.

Maat: H-270mm W- 360mm L-460mm Gewicht: 2 kg

Materiaal: 100% polyester

Materiaal binnenkant: 97% Polyethylene

3% Polyester

Kunststof kralen

Oliz Koko-Nora® gebruikt alleen kwalitatieve materialen die geen kankerverwekkende stoffen bevatten. Daarom zijn er geen vlamvertragers gebruikt op het product.

Andere praktische informatie:

Schoonmaakinstructies staan op de achterkant van het product. Oliz Koko-Nora® raadt aan om vuil met een vochtige doek en zeep af te nemen. Meermaals wassen kan de levensduur van het product verminderen en/of kan er een gat in het product ontstaan. Gebruik het Oliz Koko-Nora®-product alleen binnenshuis om het materiaal te beschermen.

Houd het product uit de buurt van scherpe/hete voorwerpen en open vuur. Oliz Koko-Nora® zou heel graag willen kunnen garanderen dat onze producten tegen bijten kunnen, maar dat kunnen wij niet. Tandjes worden als zeer scherpe voorwerpen geteld, dus als de persoon in het product bijt, kan er een gat in het product ontstaan, dus inspecteer het product altijd voor gebruik. Het wordt aanbevolen om, gezien het gewicht, beide handen te gebruiken bij het verplaatsen van het product en niet aan het product te trekken. Als u het product in een voertuig vervoert, moet het product worden vastgezet om te voorkomen dat het rondvliegt en iemand verwondt. Als er een gat in het product zit, moet het product onmiddellijk van de persoon worden verwijderd. Het Oliz Koko-Nora®-product moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen, aangezien losse voorwerpen en de inhoud gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen onder de 3 jaar en mensen met dementie. De producten zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron of een andere warmtebron.

NIEUWS!

Als je merkt dat de vulling binnenin het product te stijf of hard wordt, heb je de mogelijkheid om de rits aan de voorkant te openen en de vulling in de staart en het hoofd te verwijderen en te vervangen door nieuwe, frisse vulling.

Vul het opnieuw bij totdat jij vindt dat het hoofd en de staart precies goed aanvoelen. Vergeet niet om de ritssluiting weer onder het kleine stukje stof te duwen, zodat nieuwsgierige kinderen er niet bij kunnen.

Dit geeft het product nieuw leven – en zorgt ervoor dat het nog langer meegaat!

Wat betreft milieubescherming:

Help het milieu door uw product niet bij het huisvuil te gooien. Snijd het product in stukken en verdeel de afzonderlijke componenten zoals plastic en stof volgens de algemene lokale voorschriften - in de relevante recyclingsystemen.

Waarschuwingen:

Als de persoon ernstig wordt beperkt door motorische en/of fysieke omstandigheden, moet het product met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt. Gebruik het product niet als de persoon het niet zelf kan verwijderen! Om veiligheidsredenen raden we over het algemeen aan dat mensen die een Oliz Koko-Nora®-product gebruiken tijdens het gebruik onder toezicht staan. Na gebruik van het product dienen personen die toezicht nodig hebben buiten bereik van het product te worden gehouden. Houd de luchtwegen vrij wanneer u het product gebruikt. Als de persoon moeite heeft met ademen, plaats het product dan niet op de borst, omdat het gewicht een negatief effect kan hebben op de ademhaling en verstikkingsgevaar kan veroorzaken. Alle producten met een gewicht moeten met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien het gewicht o.a. kan een verstopping van de bloedsomloop veroorzaken. Een Oliz Koko-Nora®-product mag niet in de buurt van water worden gebruikt, omdat dit verdrinking kan veroorzaken. Gooi het product niet, omdat de plastic kralen in de wangen zowel het product als mensen in de buurt kunnen beschadigen. Er zijn kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar. Controleer het product daarom altijd vóór en na gebruik!

Garantie:

Bij fabricagefouten geeft Oliz Koko-Nora® twee jaar garantie. Deze garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt zoals aangegeven. Schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik sluit het gebruik van de garantie uit. Het product kan in een zak worden vervoerd. Bij correct gebruik gaat het product langer mee.

Neem voor verdere vragen gerust contact op met Majbritt Hillerup. Lees en bewaar deze originele handleiding voor toekomstig gebruik.